




簡単にできるセルフメンテナンス 4つのチェックポイント

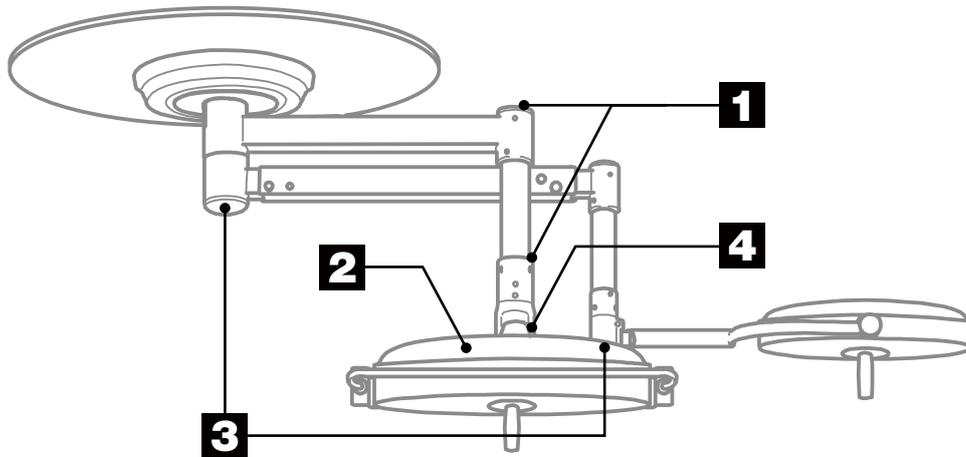

脱落したネジの落下を防ぐために



1 連結・取付部分などをチェック!

ねじのゆるみ はありませんか?

よく動かす部分は、ネジもゆるみやすくなります。ネジのゆるみは目視だけでは気がつかないことも。なるべく、手で触ってご確認ください。

はがれた塗装の落下を防ぐために



2 本体・灯体カバーなどをチェック!

外観・塗装の損傷 はありませんか?

灯体同士、また、大型のX線画像診断機器などの他機器と接触しやすい灯体カバー部分は、塗装にヒビやハガレが発生しやすいポイントです。

油の付着や油滴の落下を防ぐために



3 大回転・バランスメカ部分などをチェック!

油漏れ はありませんか?

油漏れは、経年劣化が原因で発生することがございます。ご使用機器の耐用年数もご確認ください。

スムーズな手術進行の妨げを防ぐために



4 灯体をチェック!

動きはスムーズですか? 任意の位置で停止しますか?

前後左右方向への動きをチェックしてください。しっかりと停止されることも、あわせてご確認ください。