

# S.K.Y.PRO

無影灯除菌専用ウェットペーパー




主成分	加速化過酸化水素
用途	コンタクトポイント（人の手が触れる場所）の清拭清掃 医療器具表面の清掃清拭
特徴	洗浄及び除菌が1ステップで行えます。残留成分が少ないため、 環境面や人体に対しての影響が少ないです。

## 医療機器・人体に対する安全性

S.K.Y.PRO は非腐食性、非刺激性、無毒性で揮発性有機化合物（VOC）を含みません。また、S.K.Y.PRO は分解性に優れていますので、環境に優しい製品です。

## 高い洗浄能力

S.K.Y.PRO は、界面活性剤の組み合わせを持っておりカナダ政府検査基準をクリアしている洗浄能力があります。

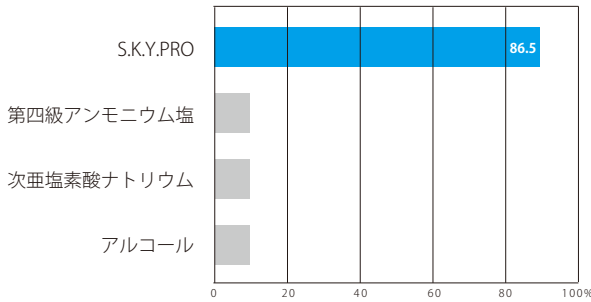

※カナダ基準委員会テスト CGSB 2.16-87 クリーニング効果 70%を以って政府検査基準で許容可能とみなされます。

## 優れた除菌力

微生物	接触時間
MRSA	30秒 (※1)
VRE	30秒 (※1)
ヒトロタウイルス	5分 (※2)
ネコ科カリシウイルス属	5分 (※2)
HIV ウィルス	5分 (※2)

※製造元VIROX社のカナダ保健省への登録時データより

■上記のテスト済

※1 サスペンションテスト (室温 0.1% S.K.Y.PRO を接触時間 30秒)

※2 定量のキャリアテスト (QCT) (5% ウシ血清土壌負荷を使用し、室温にて0.5% S.K.Y.PRO にて実施) による微生物テスト  
広域スペクトラム除菌 99.9999%以上

## 残留性ゼロ

S.K.Y.PRO は、使用後は水と酸素に分解されるため残留しません。残留性がないため耐性菌発生のリスクを軽減させます。

## 使用期限

製造から 2 年間使用が可能です。製品ラベルに使用期限が記載されています。これは開封・未開封の区別はありません。(ただし、乾燥しない様に完全にフタを閉めて使用することが前提になります)

## 環境負荷の軽減

PRTR 法の指定化学物質を含有しません。

## 様々な素材への適合性

材質	判定
ナイロン	○
ポリプロピレン	○
スチール	○
アルミニウム	○
シリコン	○
ポリカーボネート	○

※製造元 VIROX 社による適合検査により一部素材への継続的仕様においては、変色・腐蝕・一部損傷等に十分注意頂きますようお願い致します。



### 製品仕様

商品名	ウェットペーパーサイズ	入り枚数
S.K.Y.PRO	250mm×250mm	60枚

### 使用方法

フタをあげ、ウェットペーパーを取り出して拭き取ります。

### 使用上の注意事項

- ・塩素系漂白剤と混ぜないで下さい。
- ・取扱時には、手袋や保護メガネなど適切な個人保護具を着用して下さい。
- ・機器などに使用する際は、機器の取扱説明書をご確認の上、目立たない部分で試した後、ご使用下さい。
- ・直射日光や高温の場所を避けて保管して下さい。
- ・子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・ペーパー使用後は、トイレに流さないで下さい。また、乾燥を防ぐためフタをしっかり閉めて下さい。
- ・用途外には使用しないで下さい。

本社 / 関東支店  
〒101-0065  
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F  
TEL : 03-5212-6021 / FAX : 03-5212-6022

仙台支店  
〒982-0014  
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4  
TEL : 022-304-3631 / FAX : 022-304-3633

北関東支店  
〒330-0854  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1  
TEL : 048-658-0077 / FAX : 048-658-0078

名古屋支店  
〒486-0951  
愛知県春日井市花長町2丁目7番35  
TEL : 0568-36-8920 / FAX : 0568-36-8921

大阪支店  
〒564-0053  
大阪府吹田市江の木町 27-15  
TEL : 06-6192-7570 / FAX : 06-6192-7571

広島支店  
〒732-0811  
広島県広島市南区段原 4 丁目 21-6  
TEL : 082-510-2015 / FAX : 082-510-2016

福岡支店  
〒816-0932  
福岡県大野城市瓦田 5-3-29  
TEL : 092-588-3322 / FAX : 092-588-3323

埼玉工場  
〒340-0834  
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1  
TEL : 048-994-2621 / FAX : 048-994-2622